

SKYDD FÖR HALLUX VALGUS tillverkat av materialet EPITHELIUM 26®

TERAPEUTISKA INDIKATIONER

Förebygger smärta på grund av extra tryck och skavning försakad av hallux valgus (snedställd stortå).

KONTRAIKATIONER

Får inte användas på skadad hud. Om du har artärinflammation, diabetes, polyneurit, neuropati eller sår i nedre extremiteterna rådfråga läkare eller fotterapeut och kontrollera fotens skick under användningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Tvättas före första användningen.
- Skyddet ska användas på bar hud. Passar för användning på höger eller vänster fot.
- Skjut in foten i skyddet så att stortån placeras i den rörformade delen. Delen som innehåller Epithelium 26® -gelé ska vara vid knölen.
- Skyddet håller längst om det används under strumpor eller strumpbyxor.

EGENSKAPER

- Epithelium 26®, som patenterats av fotterapeuter, är en silikongelé vars tryckfördelande egenskaper påminner om underhudens egenskaper.
- En tunn Epithelium 26® -stötdämpare bredvid en snedställd stortå skyddar knölen och lindrar effektivt smärta orsakad av skavning utan att skapa något ytterligare tryck.
- Dessa enkla skydd korrigerar inte en snedställd stortå.

SKÖTSELANVISNINGAR

Maskintvätt i 30 °C i den medföljande tvättpåsen eller handtvätt (utan att gnugga). Låt själtorka. Får inte strykas.

SAMMANSÄTTNING: 61 % polyamidi-elastaanikangasta, 39 % silikonia.

De använda materialen har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standard 10993-1. Om produkten förorsakar problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2020.



Maskintvättbar i 30 °C.



Får inte strykas eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte torktumlas.



Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Lorient/Drôme
FRANKRIKE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.se

N19562SE-A
05/2022