

KORRIGERINGSKUDDE FÖR HAMMARTÅ, EPITHELIUM 26®

TERAPEUTISKA INDIKATIONER

Hammartå, klotå, förhårdnader på tåspetsarna, höga fotvalv.

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

Lindring av smärta orsakad av hammartå, klotå samt förhårdnader i tåspetsarna och ovanpå tårna.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte om huden är skadad. Om du har artärfinflammation, diabetes, neuropati eller sår i nedre extremiteterna rådfråga läkare eller fotterapeut före användning och kontrollera foten regelbundet.

EGENSKAPER

- Tåledskuddar tillverkade av Epithelium™ som gör att tår som tenderar att kröka sig kan sträckas ut på ett behagligt sätt. Kuddarna motverkar klotår och begränsar uppkomsten av liktornar på tåspetsarna och tårnas ovsida.
- Tåledskuddarna av Epithelium™ är ergonomiskt utformade, har avancerade viskoelastiska egenskaper och formar sig därför perfekt under framfoten.

UTFORMNING: EPITACT®-korrigeringskudden för hammartå är fylld med en mjuk EPITHELIUM26®-gelé som täcks av ett mjukt, luftigt tyg.

LIVSLÄNGD: Kan användas i till och med flera månader (ej tvättbar).

TIPS: Bandet som placeras mellan tårna kan skava. Rekommenderas inte för personer med diabetesneuropati.

Håll korrigeringskudden för hammartå med den platta sidan mot golvet. Det flexibla bandet träas över den tredje tån. Placera korrigeringskudden för hammartå i utrymmet under tårna så att den breda änden hamnar under den andra tån.

SKÖTSELANVISNINGAR

Maskintvätt i 30 °C: eller handtvätt med tvål och vatten (utan att gnugga). Låt själv torka. Får inte strykas. Kan användas i flera månader..

SAMMANSÄTTNING: 90 % silikon, 10 % polyamid-elastantextil.

De använda materialen har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standard 10993-1. Om produkten förorsakar problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2020.



Maskintvättbar i 30 °C.



Får inte strykas eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte torktumlas.



Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Lioriot/Drôme
FRANKRIKE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.se

N19565E-A
05/2022