

## EPITHELIUM 26® - DUBBLA SKYDDSKUDDAR

**TERAPEUTISKA INDIKATIONER:** Förebyggande och lindring av smärta i trampdynan (t.ex. p.g.a. förhårdnader, värmekänsla, långvarigt stående) och smärta förorsakad av kraftig skavning av hallux valgus.

### KONTRAINDIKATIONER

- Får inte användas på skadad hud.
- Om du har artärinflammation, diabetes, polyneurit, neuropati i nedre extremiteterna eller bensår: produkten får aldrig användas på ett sår och foten ska kontrolleras under användningen. Rådfråga också alltid en läkare eller fotterapeut. Bandet som placeras mellan tårna kan skava. Personer med diabetesneuropati bör alltså undvika att använda denna produkt.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Tvättas före första användningen.
- Används på bar hud.
- Tygdelen, med tryck, placeras vid fotsulan. Får inte användas omvänt.
- Skjut in foten i skyddskudden så att fästet hamnar mellan stortån och den andra tån.
- Skyddet håller längst om det används under strumpor eller strumpbyxor. Strumporna eller strumpbyxorna ska vara tillräckligt stora så att de inte klämmer mot foten.

### EGENSKAPER

- Epithelium 26, som patenterats av fotterapeuter, är ett utmärkt "substitut för trampdynans fettlager". Tack var de mekaniska egenskaperna fungerar gelén som ett substitut för ett smärtsamt uttunnat fettlager i trampdynan: gelén fördelar kroppsvikten väldigt bra över hela det område som bär vikten.
  - Användning av Epithelium 26 -gelén på fotsulan och bredvid hallux valgus (tunn stötdämpare) lindrar effektivt smärta utan att förorsaka något ytterligare tryck.
- De dubbla skyddsdynorna är enkla skydd som dock inte korrigerar en snedställd stortå.

### SKÖTSELANVISNINGAR

Maskintvätt i 30 °C i den medföljande tvättpåsen eller handtvätt (utan att gnugga). Låt självtorka. Får inte strykas.

**SAMMANSÄTTNING:** 85 % silikon, 15 % polyamid-elastantextil.

De använda materialen har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standard 10993-1. Om produkten förorsakar problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2020.



Maskintvättbar i 30 °C.



Får inte strykas eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte torktumlas.



Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET Innovation  
ZA Champgrand 26270 Lorioi/Drôme  
FRANKRIKE

MILLET  
INNOVATION

[www.epitact.se](http://www.epitact.se)

N19564SE-A  
05/2022