

## DIGITUBES®

### ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

Digitubes®-rören skyddar, lindrar smärta och avlägsnar förhårdnader.

### KONTRAINDIKATIONER

Använd inte på skadad hud. Om du har artärinflammation, diabetes, neuropati eller sår i nedre extremiteterna rådfråga läkare eller foterapeut före användning och kontrollera foten regelbundet.

### BRUKSANVISNINGAR

- Klipp Digitube till önskad längd med en vass sax.
- Avlägsna skyddsfilmen från gelén.
- Vänd Digitube® upp och ner och placera den på tån. Kontrollera att Epithelium™-gelén vidrör området som ska skyddas.

### EGENSKAPER

Överdriven skavning och tryck kan förorsaka hudförhårdnader. EPITHELIUM™-gelén som används i Digitubes®-rören skyddar tårna, lindrar omedelbart smärtan och bidrar till att avlägsna förhårdnader.

### UTFORMNING

Digitubes®-röret är ett mycket tunt, patenterat skydd med 1 mm EPITHELIUM™-gelé endast i ett område som omfattar halva omkretsen. Därför kan skyddet användas på intilliggande tår utan att det blir obekvämt.

### RENGÖRING OCH LIVSLÄNGD

Kan tvättas för hand och återanvändas. Det 2,5 cm stora Digitube-röret kan användas för skydd av förhårdnader i genomsnitt i 10 dygn.

### SAMMANSÄTTNING: 73 % silikon, 27 % polyamid-elastantextil.

De använda materialen har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standard 10993-1. Om produkten förorsakar problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2020.



Tvättas för hand.



Får inte strykas eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte torktumlas.



LOT Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.

**MILLET  
INNOVATION**



MILLET Innovation  
ZA Champgrand 26270 Loriol/Drôme  
FRANKRIKE

[www.epitact.se](http://www.epitact.se)

N19557SE-A  
05/2022