

## NYA GENERATIONENS PLANTARDYNOR COMFORTACT™ PLUS

PATENTERADE KUDDAR = EN BEHAGLIGARE LÖSNING



### ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL:

COMFORTACT™ PLUS -kuddarna skyddar trampdynan genom att minska trycket och lindra smärta.

### KONTRAIKATIONER:

Får inte användas på skadad hud. Om du har artärfinflammation, diabetes, polyneurit, neuropati eller sår i nedre extremiteterna ska du be en läkare eller fotterapeut om råd och observera fotens skick när skyddet används.

### EGENSKAPER:

Det mycket behagliga, ergonomiska bandet formas efter stortåns naturliga böjning, vilket minskar risken för irritation mellan tårna. Delen tillverkad av EPITHELIUM 26® -silikongelé känns som kulor i plantarområdet. Den har utvecklats för att formas på ett behagligt sätt runt trampdynan och fördela trycket.

### ERGONOMI:

Tack vare den unika utformningen och materialets jämna flexibilitet är trycket som riktas mot foten optimalt. Kuddarna är tunna, vilket gör att det är möjligt att använda smala skor och gå på ett stabilt sätt.

### SKÖTSELANVISNINGAR:

Maskintvättbar i den medföljande tvättpåsen.

**SAMMANSÄTTNING:** 84 % silikon, 16 % polyamid-elastantextil.

De använda materialen har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standard 10993-1. Om produkten förorsakar problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2020.



Maskintvättbar  
i 30 °C.



Får inte strykas  
eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte  
torktumlas.



Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET Innovation  
ZA Champgrand 26270 Loriol/Drôme  
FRANKRIKE



MILLET  
INNOVATION

www.epitact.fi