

KORRIGERANDE ORTOS FÖR HALLUX VALGUS

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

Korrigerande av den avvikande ställningen och begränsning av utvecklingen av snedställningen samt lindring av ledsmärta.

KONTRAIKATIONER


- Stortån rör sig inte i sidled.
- Använd inte på skadad hud.
- Om du har artärinflammation, diabetes, polyneuropati, neuropati i nedre extremiteterna eller bensår: använd inte produkten ovanpå ett sår, kontrollera foten under användningen och be en läkare eller fotterapeut om råd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Säkerställ först att stortåen fortfarande rör sig i sidled genom att flytta den med handen. Om tån inte rör sig, använd inte denna produkt.
- Använd inte produkten över natten.
- Ortosen kan användas på höger eller vänster fot.
- Tvättas före första användningen.

→ FÖRBEREDELSE:

- Trä trampdynan genom bandet.
- Placera huvan på stortån.
- Placera EPITHELIUM™-stötdämparen (a) bakom knölen (b). (Se diagram 1)

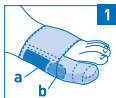

→ JUSTERAS:

- **Försök inte rätta ut stortån den första dagen.**
 - Under de följande 10 dagarna ska du rätta ut stortån lite i taget genom att dra ortosen bakåt. (Se diagram 2).
- Ortosen ska användas varje dag för att uppnå bästa möjliga effekt.



SKÖTSELANVISNINGAR

- Maskintvätt i 30 °C i den medföljande tvättpåsen eller handtvätt (utan att gnugga).
- Låt torka luftigt. Får inte strykas.

SAMMANSÄTTNING: 58 % silikon, 42 % polyamid-elastantextil.

De använda materialen har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standard 10993-1. Om produkten förorsakar problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2020.



Maskintvättbar i 30 °C.



Får inte strykas eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte torktumlas.



Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Loriol/Drôme
FRANKRIKE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.se

