

STYV UTRÄTARE AV HALLUX VALGUS

ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL: Regelbunden användning av EPITACT®-uträtaren avsedd för nattbruk korrigerar snedställningen och begränsar framskridandet av en snedställd stortå (hallux valgus). Användning av uträtaren lindrar nattlig ledsmärta och förebygger beröringssmärta.

KONTRAINDIKATIONER: Stortån rör sig inte i sidled. Använd inte uträtaren på dagen. Använd inte på skadad hud. Undvik användning om du har diabetes, artäri inflammation, polyneurit, perifer neuropati eller sår på foten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING:

- Säkerställ att stortån fortfarande rör sig i sidled genom att flytta den med handen. Om den inte rör sig får produkten inte användas.
- Skenan är termoplastisk och kan varmförmas för användning på höger eller vänster fot.

VARMFÖRMNING: Följ de medföljande anvisningarna för varmförning. Den korrigerande skenan avsedd för nattbruk kan varmförmas åtskilliga gånger. Kontakta fotterapeut vid behov.

PÅTAGNINGSANVISNINGAR:

- För in hälen i den breda fåran.
- Stick in stortån i det lilla röret.
- Försäkra dig om att det vita riktmärket hamnar ovanpå knölen (se diagrammet i de medföljande anvisningarna för varmförning).

ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN:

- Det rekommenderas att skenan används i ett par timmar de första 2–3 nätterna.
- Därefter används skenan hela natten. Under de första användningsgångerna kan ledsmärta ibland förekomma. Om smärtan fortsätter längre än 7 nätter, kontakta fotterapeut.
- När du har använt skenan i en månad och inte har någon smärta, kan skenan varmförmas på nytt så att korrigeringsgraden förstoras (se de medföljande anvisningarna för varmförning). Då uppnås önskad korrigeringsgrad utan tåspridare genom att dra stortån i sidled (se diagrammet på motsstående sida).



TVÄTTANVISNINGAR:

- Maskintvätt i 30°C i den medföljande tvättpåsen eller handtvätt (utan att gnugga).
- Låt självtorka. Får inte strykas. Får inte utsättas för hetta (→ 50°C).

SAMMANSÄTTNING: 52 % termoplastisk plast, 28 % polyamid-elastantextil, 20 % silikon. De använda materialerna har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standarderna 10993-1. Om produkten försäkras problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2015.



Maskintvättbar i 30 °C.



Får inte strykas eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte torktumlas.



Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Lorioi/Drôme
FRANKRIKE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.se

N19551SE-A
05/2022