

PHYSIO'CHOC™-KANTAPÄÄTYNYT

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

Förebygger och lindrar led- och ryggsmärta som beror på de stötar som stegen förmedlar till kroppen. Lindrar smärta förorsakad av hälsporre.

KONTRAINDIKATIONER

- Om du får en allergisk reaktion ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation.
- Får inte användas på skadad hud.
- Om du har artärinflammation, diabetes, polyneurit, neuropati i nedre extremiteterna eller bensår: produkten får aldrig användas på ett sår och foten ska kontrolleras under användningen. Be också alltid en läkare eller fotterapeut om råd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Hälkuddarna ska användas med strumpor eller strumpbyxor.
- Avlägsna skyddsfilmerna från den dubbelsidiga tejen före den första användningen. Placera hälkuddarna i skorna.
- Om hälkuddarna är för stora för skorna kan de klippas till önskad storlek med en sax.

EGENSKAPER

- Physio'Choc™-materialet har validerats av fotterapeuter och absorberar effektivt stötar. Användning av hälkuddar tillverkade av detta material splittrar energin som uppstår när foten stöter i marken. Detta minskar led- och ryggsmärtan.
- Hälkuddarna höjer också hälen med 5 mm, vilket minskar spänningen i fotsulans bindvävshinna och även det obehag som en hälsporre förorsakar.

SKÖTSELANVISNINGAR

- Hälkuddarna är inte tvättbara.

SAMMANSÄTTNING: 76 % Physio'Choc™-material (elastomer), 24 % silikon.

De använda materialet har godkänts i alla myndighetstester för material som kommer i kontakt med huden vilka definieras i ISO-standard 10993-1. Om produkten förorsakar problem ska du genast sluta att använda produkten och informera MILLET Innovation. Millet Innovation är inte ansvarigt om produkten används i strid med tillverkarens rekommendationer. Referensspråket är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2020.



Får inte tvättas.



Får inte strykas eller ångas.



Undvik kemtvätt.



Får inte blekas.



Får inte torktumlas.



LOT Se förpackningen.

Framtagen efter forskning av MILLET Innovation.



MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Loriol/Drôme
FRANKRIKE

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.se

N1955SE-A
05/2022